

legadvies Absorin Sanette



Het is noodzakelijk Absorin Sanette te fixeren met goed elastisch ondergoed of met een speciaal fixatiebroekje zoals Absorin StretchSlip of Absorin Cotton Fix zodat het product goed op het lichaam aansluit.

Juist aanleggen

Het juist aanleggen van Absorin Sanette bevordert de absorptie en voorkomt lekkage.

Verband verzadigd

Op de urineverzadigingsindicator (de tekst op de buitenzijde van Absorin Sanette) kunt u controleren of het verband verzadigd is. Wanneer alle letters vervaagd zijn, is het verband volledig verzadigd en is het noodzakelijk het verband te verwisselen. Zijn de letters nog niet volledig vervaagd dan is het nog niet nodig het verband te verwisselen. Ontstaat er lekkage voordat het verband verzadigd is, controleer dan of Absorin Sanette wel op de juiste manier is aangelegd.

Ontlastingsverlies

Bij ontlastingsverlies verwisselt u Absorin Sanette direct, ontlasting wordt namelijk niet opgenomen door het absorberende gedeelte van het verband met als mogelijk gevolg huidirritatie.

Schoon en droog

Zorg dat de huid goed schoon en droog is. Gebruik geen zeep maar alleen water of een zeepvrije, pH-neutrale waslotion (bijvoorbeeld Klinion Personal Care Wash Lotion). U kunt de huid beschermen met Klinion Personal Care Barrier Cream.


Verwijderen

Verwijder in verband met de hygiëne het verband van voren naar achteren.

Aanleggen Absorin Sanette

staand

1. Trek het fixatiebroekje aan (met de naden naar buiten) en trek het kruis op tot aan de bovenkant van het bovenbeen. Sla de bovenkant van het broekje terug tot halverwege het bovenbeen.
2. Vouw Absorin Sanette open en vouw het product goed dubbel over de lengte zodat er een komvorm ontstaat en de anti-lek-randjes omhoog gaan staan.
3. Trek Absorin Sanette van voor naar achter aan waarbij de grote boog achter hoort. Let op dat Absorin Sanette netjes in het midden zit.

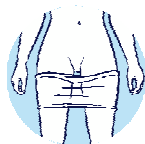


4. Trek eerst de achterkant van het fixatiebroekje omhoog en vouw Absorin Sanette plat over de billen uit, de bovenkant van de absorberende kern hoort net iets boven de bilnaad uit te komen.



5. Haal met een zigzaggende beweging met twee handen de voorkant van Absorin Sanette naar voren zodat het product goed aansluit in de liezen. Vouw de voorkant plat op uw buik, de voorkant van Absorin Sanette zit dan ongeveer halverwege het kruis en de navel.





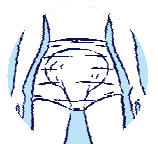



6. Trek de voorkant van het fixatiebroekje omhoog en zorg ervoor dat het broekje goed aansluit in de liezen. Haal zo nodig met de vingers liesplooien buiten het fixatiebroekje.



Aanleggen Absorin Sanette

liggend

1. Trek het fixatiebroekje aan (met de naden naar buiten) en trek het kruis op tot aan de bovenkant van het bovenbeen. Ga op uw zij liggen, houdt uw bovenliggende been gebogen. Haal het fixatiebroekje aan de bovenliggende zijde naar beneden en trek het zo mogelijk om de knie heen. 
2. Vouw Absorin Sanette open en vouw het product goed dubbel over de lengte zodat er een komvorm ontstaat en de anti-lek-randjes omhoog gaan staan. 
3. Doe Absorin Sanette van voor naar achter aan waarbij de grote boog achter hoort. Let op dat Absorin Sanette netjes in het midden zit. 
4. Trek eerst de achterkant van het fixatiebroekje omhoog en vouw Absorin Sanette plat over de billen uit, de bovenkant van het absorberende gedeelte hoort net iets boven de bilnaad uit te komen. 
5. Rol terug op uw rug. Controleer aan uw andere zijde of het fixatiebroekje goed omhoog is getrokken en Absorin Sanette plat over de billen is uitgevouwen. 
6. Haal met een zigzaggende beweging met twee handen de voorkant van Absorin Sanette naar voren zodat het product goed aansluit in de liezen. Vouw de voorkant plat op uw buik. De voorkant van het product zit dan ongeveer halverwege het kruis en de navel. 
7. Trek de voorkant van het fixatiebroekje omhoog. Zorg ervoor dat het broekje goed aansluit in de liezen. Haal zo nodig met de vingers liesplooien buiten het fixatiebroekje. 